

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

NOWE
Inteligentne
łóżko

sentida 7-i



**DESTINI
CARE**

Łóżko multimedialne

Technologia skutecznie ułatwiająca opiekę pielęgniarstwa

sentida 7-i

Digitalizacja przy pomocy sentida 7-i

360° opieka w sieci Zyskaj czas wart nawet dwóch pełnych etatów pielęgniarstwa	4 - 5
10 dobrych powodów sentida 7-i technologia cyfrowa	6 - 7
1 Dokumentacja medyczna na żywo Dane zapisuj bezpośrednio przy łóżku	10
2 System bezpieczeństwa Dostęp nadzorowany	11
3 Monitorowanie masy za pomocą ekranu dotykowego Oszczędzaj czas ważąc pacjenta w łóżku	12
4 Kontrola BMI Wczesne wykrycie niedożywienia pacjenta	13
5 Sygnalizacja nieplanowanego opuszczenia łóżka System wczesnego ostrzegania przed opuszczeniem łóżka	14
6 Łączność Gotowy na Twoją infrastrukturę	15
7 Wiele połączeń Wezwania według priorytetów	15
8 Czujnik bezpieczeństwa Z korzyścią dla pacjenta	16
9 Mobi-Lift® Dla samodzielnej mobilizacji	17
10 Asystent wilgoci Sensoryczna podkładka	18



Dodatkowe zalety sentida 7-i

Komfort i bezpieczeństwo pacjentów SafeControl – podświetlany przełącznik ręczny	19
Intensywna opieka Pakiet intensywnej opieki	20
Skuteczne zapobieganie odleżynom Ergonomiczna powierzchnia do leżenia Podwójne rozsuniecie leża	21
Ochrona i mobilność bez FDM* SafeFree® koncepcja ochrony bocznej	22 - 23
Bezpieczna opieka, mobilizacja i sen system 3-STOP	24
Elastyczność i oszczędność czasu Beznarzędziowa regulacja długości łóżka	25

Modele i wzory

2 modele do wyboru	28
2 lampki	29
CareBoard® 2 pozycje do wyboru	28
Design zagłówek/zanózek	30
Kolory dekory	31
Pokrowiec	32 - 33
Sprzęt i akcesoria	34 - 35

360° opieka w sieci

Zyskaj czas wart nawet 2 pełnych etatów* pracowników

Cyfryzacja i potrzeba opieki to często omawiane modne hasła – sentida 7-i jest na nie odpowiedzia.

sentida 7-i zapewnia niezawodne rozwiązania odciążające personel pielęgniarSKI, takie jak nowe narzędzie dokumentacji pielęgniarSKiej bezpośrednio przy łóżku. Wprowadzanie ich do CareBoard® oszczędza mnóstwo formalności i chodzenia do komputera, a tym samym pomaga uzyskać cenny czas opieki do 5 minut na jednego pacjenta. Zintegrowana waga w łóżku pozwoli zaoszczędzić do 15 minut na jednym procesie ważenia (nie wymaga transportu mieszkańca na osobną wagę znajdującą się poza łóżkiem).


W sumie oznacza to oszczędność czasu do 3400 godzin rocznie dla 100 mieszkańców, co odpowiada godzinom pracy co najmniej dwóch pielęgniarek pracujących w pełnym wymiarze godzin.

Nowe funkcje cyfrowe nie tylko zmniejszają obciążenie związane z opieką, ale także pomagają uczynić placówkę bardziej ekonomiczną. Stosujesz najwyższe standardy bezpieczeństwa i oszczędzasz cenny czas opieki na rzecz swoich mieszkańców.



10 dobrych powodów

sentida 7-i technologia cyfrowa

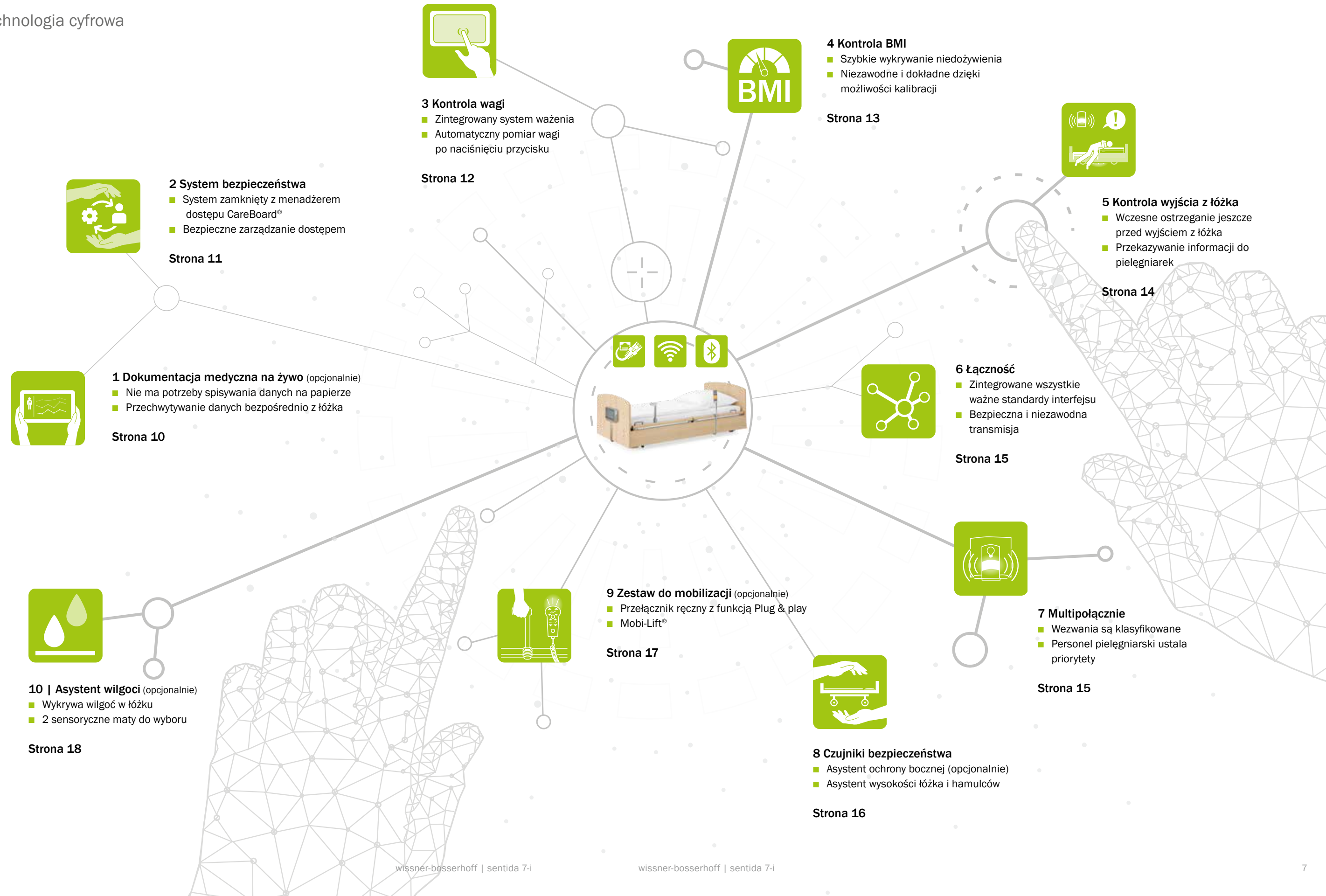



Aranżacja Las

sentida 7-i | Design Df

Nie ma prawie nic bardziej relaksującego niż spacer po lesie. Świeże powietrze i soczyste odcienie zieleni i brązu odświeżają i ożywiają nas. Pomagają dodatkowo oczyścić nasze głowy. Zostało to nawet udowodnione naukowo: japońscy naukowcy odkryli, że chodzenie po lesie obniża ciśnienie krwi i tętno. Poza tym poziom adrenaliny jest niższy niż po spacerze po mieście. Ta aranżacja to tylko sugestia - chętnie udzielimy Ci indywidualnej porady.

Odcień drewna
Sosna wiejska




Skóra syntetyczna
Srebrnoszary



Kolor ścian



Kolory Deko

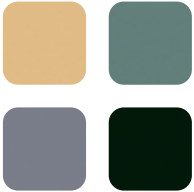

1 | Dokumentacja medyczna na żywo (Opcjonalnie)

Bezpośrednio do systemu zamiast na papier



NOWE!

Zaawansowana sentida 7-i jest zintegrowana z CareBoard® w łatwy sposób. Dzięki 7-calowemu ekranowi dotykowemu LCD różnorodność funkcjonalna została z powodzeniem uporządkowana w przejrzystym menu, ułatwiając użytkownikowi codzienną opiekę.

- Prosta i intuicyjna obsługa dzięki przejrzystemu menu
- Tryb oszczędzania energii: automatyczne wyłączenie po około 10 minutach
- Wysokie bezpieczeństwo: menu logowania tylko dla personelu pielęgniarstwa. Proste wylogowanie za pomocą przycisku STOP.



- Dane nie muszą być już dłużej spisywane na papierze.
- Zaoszczędź do 5 minut.



W nowym menu rutynowych czynności pielęgniarstwa można szybko i łatwo zarejestrować najważniejsze dane życiowe*, takie jak ciśnienie krwi, tętno lub temperatura. Dane są przesyłane bezpośrednio na serwer oprogramowania pielęgniarstwa za pomocą funkcji „Zapisz i wyślij”.



Dzięki funkcji **“Zapisz i wyślij”** wagę mieszkańca i jego istotne dane są łatwo przechowywane i wysyłane*



Zyskaj cenny czas wart nawet
2
pracowników etatowych**

2 | System bezpieczeństwa

Dostęp nadzorowany



Dzięki sentida 7-i wissner-bosserhoff ustanawia nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i łatwości konserwacji oraz pokazuje, że jest to możliwe również bez podatnych na wirusy aplikacji na smartfony / tablety. CareBoard® posiada zamknięty system operacyjny, co oznacza brak wirusów lub negatywnych wpływów zewnętrznych pochodzących z innego oprogramowania lub aplikacji. Stałe połączenie kablowe CareBoard® zapewnia również bezpieczeństwo użytkownika przez cały czas w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych.



Zarządzanie dostępem z różnymi prawami użytkownika zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo. Przypadkowe wyłączenie ważnej funkcji monitorowania jest zatem niemożliwe.




* Żadne z danych rezydenta nie są przechowywane spersonalizowane i mogą być później przypisane rezydentowi w oprogramowaniu do opieki pielęgniarstwa z uwzględnieniem ochrony danych.
** Poprzez zaoszczędzony czas na ważeniu (por. Str. 10) oraz w dokumentacji pielęgniarstwa. Założenia: 100 mieszkańców w okresie roku

* Żadne z danych rezydenta nie są przechowywane spersonalizowane i mogą być później przypisane rezydentowi w oprogramowaniu do opieki pielęgniarstwa z uwzględnieniem ochrony danych.

3 | Monitorowanie masy za pomocą ekranu dotykowego

Oszczędność czasu dzięki ważeniu w łóżku

Skalibrowana waga zintegrowana z łóżkiem wspiera personel pielęgniarski bez czasochłonnego korzystania z podnośnika lub wózka inwalidzkiego, a tym samym zapewnia wygodne i przyzwoite rejestrowanie wagi w dokumentacji. Ponadto przechowywany profil masy, który jest wyświetlany co tydzień lub co miesiąc, może poprawić opiekę medyczną i dostarczyć dodatkowych wniosków dotyczących dawkowania leków lub oceny przekrwienia limfatycznego w nogach. **Dzięki nowej funkcji „Zapisz i wyślij” dane wagi są natychmiast dostępne w dokumentacji.**

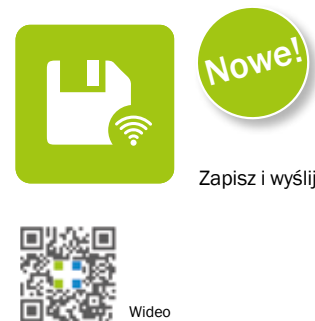

Tradycyjne
ważenie jest
czasochłonne oraz
energochłonne

- Potrzebne są dwie pielęgniarki
- Stres dla mieszkańca
- Wiele przegrupowań



Zalety zintegrowanej,
skalibrowanej wagi

- Wyświetlanie wagi i bezwzględna zmiana masy
- Eksportuj dane do dokumentacji pielęgniarstwa za pomocą funkcji „Zapisz i wyślij”
- Oszczędność czasu do 15 minut na proces ważenia

(Źródło: własne obliczenia)

Zyskaj
**cenny
czas**
z korzyścią dla
mieszkańców*

4 | Kontrola BMI

Wczesne wykrycie niedożywienia przed wizytą u lekarza

Zmiany w jedzeniu i piciu często prowadzą do niezauważalnego zużycia energii w starszym wieku. Masa ciała spada i w niektórych przypadkach prowadzi do niedowagi (anoreksja wiekowa). Pacjenci jednocześnie dotknięci chorobą często są niedostatecznie zaopatrzeni w niezbędne składniki odżywcze, witaminy i minerały. Wskaźnik masy ciała (BMI) umożliwia lekarzowi prowadzącemu szybkie wykrycie niedożywienia. W przypadku sentida 7-i BMI można ocenić bezpośrednio w CareBoard.®.




Wczesne wykrycie niedożywienia poprzez
codzienną kontrolę BMI

- Dzięki zintegrowanej skali wagi w łóżku Sentida 7-i masz przez cały czas pełną kontrolę BMI.
- Klasy BMI umożliwiają szybkie wykrycie niedożywienia i poinformowanie lekarza prowadzącego (zwykle BMI <19 w pielęgniarstwie).
- Codzienna kontrola BMI pozwala wyciągnąć wnioski na temat ogólnego stanu pacjenta.
- Oznaczenie BMI opiera się na skalibrowanym systemie ważenia, a zatem jest bardzo niezawodne i dokładne.
- Dla bezpieczeństwa Twojego i dobrego samopoczucia Twoich krewnych.



Stwórz różnicę w
opiece medycznej,
której będą Ci
zazdrościć inni

Indeks masy ciała

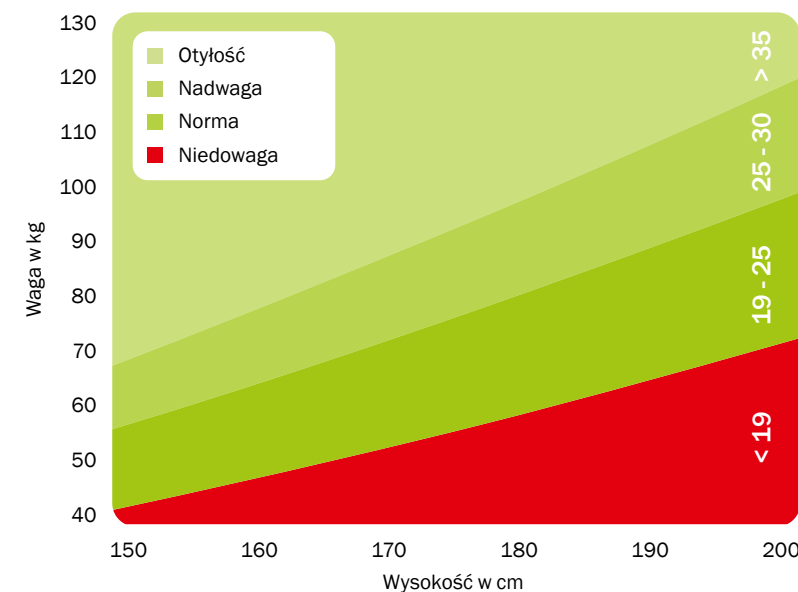

Okolo
50%
pacjentów powyżej 65 roku
życia
z normalną wagą grozi
niedożywienie. BMI może powoli
przesunąć się w czerwony obszar
indeksu masy ciała.

Źródło Ocena BMI od 65 roku życia, jem - Journal
für Ernährungsmedizin, 2006, S. 16

5 | Sygnalizacja nieplanowanego opuszczenia łóżka przez mieszkańca

System wczesnego ostrzegania nawet jeszcze przed wyjściem z łóżka

wissner-bosserhoff pomaga zbudować maksymalnie bezpieczne otoczenie w pokoju (FDM). sentida 7-i to zaawansowane łóżko do domu opieki z inteligentnym systemem czujników, które niezawodnie pomagają w ograniczaniu działań pozbawiających wolności w dzień i w nocy. Wyposażony jest w automatyczne oświetlenie nocne, które włącza się w momencie opuszczenia łóżka przez mieszkańca i wyłącza się, gdy mieszkaniec jest z powrotem w łóżku. sentida 7-i jest kompatybilna z prawie wszystkimi standardowymi systemami przywołania pielęgniarki.



Wideo



Czujnik wczesnego ostrzegania przed wyjściem z łóżka –
Najlepsza możliwa ochrona przed upadkiem przez sygnał wezwania przed opuszczeniem łóżka



Powiadomienie o wyjściu z łóżka –
Dla szybszej reakcji po wyjściu z łóżka

Światło nocne automatyczne

- Światło nocne włącza się automatycznie, gdy pacjent wstanie z łóżka oraz gaśnie po jego powrocie.
- Elastyczny harmonogram wezwań pielęgniarki.



Elastyczny czas powiadomienia pielęgniarki

- Elastyczny i płynnie regulowany alarm uruchamiany natychmiastowo po wstaniu z łóżka lub do 30 min od wstania z łóżka.
- Personel automatycznie wezwany, gdy system wykryje możliwość wypadnięcia z łóżka.
- Dostosowanie do mobilności pacjenta.



Większe bezpieczeństwo = mniej ograniczeń

- Mniej wizyt kontrolnych, szczególnie podczas nocnych i weekendowych zmian.
- Systematyczne wdrażanie ustaleń inicjatywy w celu zmniejszenia ograniczeń, „Werdenfeller Weg” (Ścieżka opieki w Werdenfels)
- Szybszy czas reakcji w przypadku upadków.

6 | Łączność

Gotowy na Twoją infrastrukturę

NOWE!

Cyfrowe łóżko opiekuńcze sentida 7-i zintegrowało wszystkie ważne standardy interfejsów i wykorzystuje sprawdzone standardowe protokoły z systemu opieki zdrowotnej do przesyłania danych pacjentów. Gwarantuje to bezpieczną i niezawodną transmisję danych pacjentów w czasie prawie rzeczywistym, co oszczędza czas personelu pielęgniarskiego i znacznie zmniejsza obciążenie pracą.



LAN



Bluetooth®

Standardowe interfejsy



Standardowe medyczne protokoły radiowe

7 | Wiele połączeń

Wezwania według priorytetów

Niezależnie od tego, czy aktywowane jest wezwanie do opuszczenia łóżka, aktywowany jest boczny asystent ochrony lub asystent wilgoci. Połączenie wielofunkcyjne umożliwia rozróżnianie i ustalanie priorytetów połączeń. Oznacza to, że opiekun natychmiast wie, który pacjent najbardziej potrzebuje pomocy.



Wideo



- Wczesne ostrzeganie przed opuszczeniem łóżka
- Wyjście z łóżka przy opóźnionym czasie przywoływaniu pielęgniarki
- Tryb dzienny i nocny



- Wysokość łóżka i asystent hamowania
- Tryb awaryjny, aby zabezpieczyć zatwierdzony FDM w nocy



- Ochrona przed maceracją poprzez wczesne wykrywanie wilgoci w łóżku
- Mata bawełniana lub plastikowa (akcesoria)
- Wzmocnienie godności pacjenta

NOWE!


8 | Czujniki bezpieczeństwa (opcjonalnie)

Z korzyścią dla Twoich pacjentów

Trzy systemy czujników zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa w łóżkach. Zintegrowany system czujników wysyła połączenie wielokrotne, gdy tylko aktywowany asystent zgłosi niebezpieczny stan łóżka, a tym samym pomaga zapobiegać upadkom.



Wideo

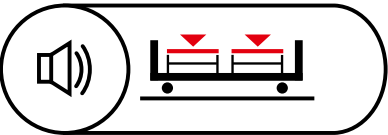

Safe




Free

Asystent ochrony bocznej (opcjonalnie) z dwoma trybami Free & Safe:

Tryb Free: Asystent ochrony bocznej automatycznie zgłasza przypadkowo podniesione osłony boczne. W ten sposób można skuteczniej zapewnić poczucie bezpieczeństwa pacjenta(FDM).

Tryb Safe: W trybie awaryjnym asystent ochrony bocznej zapewnia większe bezpieczeństwo bardzo aktywnych mieszkańców . Świadoma lub nieświadoma dezaktywacja ochrony przyłóżkowej jest również automatycznie zgłaszana opiekunowi.

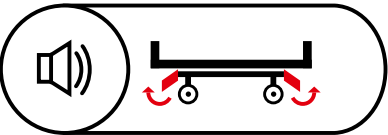

Asystent wysokości łóżka informuje personel pielęgniarstwa o zmianie wysokości łóżka. Pod warunkiem, że na przykład niska pozycja w nocy i najlepsza pozycja transferowa w ciągu dnia są ustawione, a tym samym przyczyniają się znacząco do zapobiegania upadkom.

Asystent hamowania sygnalizuje zwolnienie hamulca i brak zablokowania ponownie po pielęgnacji lub czyszczeniu.

Stany monitorowania



inactive



active



nurse call



Tryb opieki umożliwia wyłączenie wszystkich alarmów świetlnych. Pozwala to uniknąć niezamierzone aktywowanie alarmów świetlnych podczas codziennych rutynowych czynności pielęgniarstwa. Po 10 minutach włącza się automatycznie.

9 | Mobi-Lift® (opcjonalnie)

Do samodzielnej mobilizacji



Wideo



- Mobi-Lift®:
- Składany
 - Ergonomiczny
 - Stabilny

Syndrom bezruchu

Jeśli dana osoba jest przykuta do łóżka, jej ruchy są ograniczone. Jeżeli nie zaczniemy przeciwdziałać ograniczeniu mobilności, u pacjenta rozwinie się tak zwany zespół bezruchu.

RYZYKO:

- zakrzepicy
- odłżyn
- dezorientacji

(Pomoc pielęgniarstwa: podręcznik opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa i geriatrycznej, opublikowane przez Thieme)



Mobilizacja z Mobi-Lift®

- Zintegrowany obustronny system pomocy w pozycji stojącej
- Elektryczna regulacja wysokości
- Wspiera i utrzymuje mobilność
- Zmniejsza obciążenie personelu pielęgniarstwa

10 | Asystent wilgoci (opcjonalnie)

Wsparcie sensoryczne z funkcją wywoływania

Jeśli w łóżku jest wilgoć, informacja jest zgłaszana do istniejącego systemu połączeń. Asystent wilgoci wcześniej wykrywa wilgoć w łóżku i pomaga zadbać o higienę pacjenta. Dostępny jest bawełniany arkusz czujnika, który można prać w temperaturze 60 °C (01) oraz odporna na rozmazywanie mata z tworzywa sztucznego (02).



01 bawełniany arkusz sensoryczny, który można prać w 60 ° C

Około

75%

wszystkich mieszkańców domów opieki cierpi na nietrzymanie moczu.

W wartościach bezwzględnych to ok.

300,000

mieszkańców domów opieki.

(Źródło: www.bvmed.com from 03/01/2019)



02 Plastikowa mata czujnikowa, odporna na rozmazywanie

↓

Ochrona przed nietrzymaniem moczu

Podkładka czujnika wilgotności wykonana z bawełny lub tworzywa sztucznego, którą można prać, wykrywa wilgoć w łóżku i chroni pacjenta przed maceracją, szczególnie w przypadku nietrzymania moczu.

Komfort i bezpieczeństwo

SafeControl – podświetlany przełącznik ręczny



Konstrukcja pilota SafeControl robi wrażenie na pierwszy rzut oka, dzięki swojej przejrzystej konstrukcji i ergonomii designu. Duże, wypukłe przyciski są wyraźnie rozmieszczone i umożliwiają łatwą obsługę, szczególnie w nocy, dzięki podświetlanemu panelowi sterowania.

LED: Blokada podnóżka/oparcia pleców

Z lewej: regulacja wysokości

Z prawej: auto kontur podnóżka oraz oparcia pleców

LED: blokowanie regulacji wysokości

LED-włączanie i wyłączanie

Po lewej: regulacja oparcia uda

Po prawej: regulacja oparcia

Safety-GO-przycisk bezpieczeństwa

↓

Zaawansowane funkcje

- Prosta i przejrzysta obsługa
- Podświetlenie
- Zintegrowane światło LED
- Oddzielna regulacja podnóżka
- Plug&Play do szybkiego podłączenia

Opieka w intensywnej terapii

Pakiet opieki

Bezpieczeństwo i zgodność z normą IEC 60601-2-52, jak również korzyści dla opieki nad pacjentem, mają najwyższy priorytet. Łóżko medyczne sentida 7-i oferuje zaprogramowane pozycje do nagłych wypadków i terapii, które mogą być uruchamiane nawet w przypadku awarii ekranu dotykowego LCD.



Przycisk zatrzymania awaryjnego natychmiast zatrzymuje niepożądane ruchy łóżka i odłącza łóżko. Łóżko jest standardowo wyposażone w baterię. Wszystkie funkcje awaryjne są również aktywne podczas pracy poza siecią. Opiekun może opuścić oparcie za pomocą prostego ręcznego sterowania .



Safety-GO przycisk bezpieczeństwa i wyświetlacz WYŁĄCZONY



Przycisk zatrzymania i awaryjnego wylogowania



Automatyczny przycisk pozycji Trendelenburga




Automatyczny przycisk - CPR

Skuteczne zapobieganie odleżynom


Ergonomiczna powierzchnia do leżenia | Podwójne wycofanie

Ergonomiczny podział powierzchni leżącej pomaga uniknąć obciążeń uciskowych, a tym samym zmniejszyć odleżyny. Wymia-ry 4-sekcyjnej powierzchni leża z łóżek pielęgnacyjnych wissner-bosserhoff są oparte na średniej wysokości osoby.

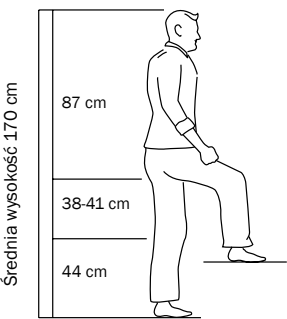

Antropometria według Prof. Eigler*


Na podstawie wiedzy od prof. Eiglera* widać, że obszar oparcia powinien mieć co najmniej 80 cm długości, aby skutecznie podprzeć kręgosłup szyjny. Podstawa materaca BiNetic osiąga dodatkowe zmniejszenie obciążeń dociskowych

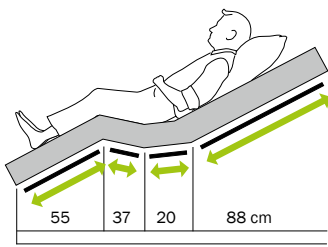


BiNetic-powierzchnia leżąca 200 cm (długie oparcie)

3 typy powierzchni leża strona 34

WIBO - powierzchnia leżąca

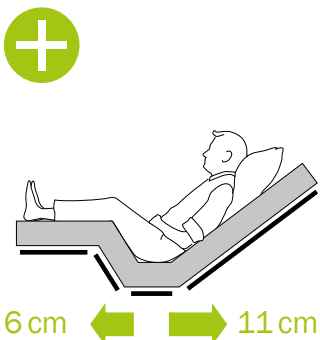


Podwójne cofnięcie = zapobieganie odleżynom

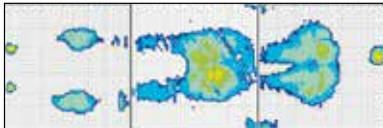


Termografia powierzchni leżącej BiNetic

Standardowa powierzchnia leżąca

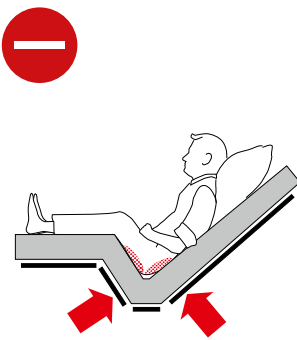

Pojedyncze cofnięcie = ryzyko odleżyn

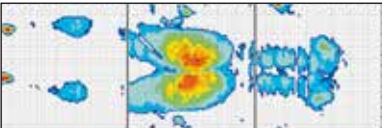

Termografia standardowej powierzchni leżącej

Efekty podwójnego cofnięcia leża**

BiNetic charakteryzuje się podwójnym cofnięciem leża. Przesuwane jest nie tylko oparcie, ale także podnózek z dala od części siedziska, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia siedziska. Wyniki pomiarów nacisku wyraźnie pokazują, że obciążenie ciśnieniowe na podwójnie cofniętym leżu jest niższe niż przy pojedynczym cofnięciu i znacznie mniejsze niż przy standardowej powierzchni do leżenia. Podwójne cofnięcie leża nie powinno służyć jednak jako tylko jedyne zabezpieczenie zapobiegające odleżynom.

17cm więcej miejsca w łóżku

Ochrona i mobilność bez FDM*

SafeFree® opatentowana koncepcja ochrony bocznej

Podział systemu bezpieczeństwa SafeFree® jest opatentowany, certyfikowany, a technologia wypróbowana i przetestowana ponad milion razy. Można go wygodnie i szybko obniżyć w zaledwie 2 sekundy i ponadto zajmuje niewiele miejsca, a w zależności od sytuacji i wielkości pacjenta można go indywidualnie ustawić na 4 poziomach wysokości.

1

Nie wymaga ochrony



Po opuszczeniu podzielone osłony boczne zapewniają przytulny wygląd i bezproblemowy dostęp do pacjentów w celach codziennej opieki. Akcesoria, takie jak środkowe słupki lub stałe części boczne, nie muszą być wyjmowane i przechowywane oddzielnie.

2

Miękka ochrona (bez FDM*)



Dla bezpieczeństwa w nocy często wystarcza połączyć niską pozycję łóżka z pierwszym wysuwanym poziomem urządzenia zabezpieczającego zagłowie. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych barier i zmniejsza ryzyko upadku.

3

3/4 ochrony (bez FDM*)



Umożliwia to celową przerwę w dolnej części podnóża, aby zmniejszyć środki skrupowania wolności (FDM) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

4

Pełna ochrona (FDM*)

dla materacy do 18cm wysokości




Najwyższa górna pozycja służy do wszechstronnej ochrony pacjenta. Obydwie części osłon bocznych są tak szczelnie zamknięte, że są tak bezpieczne jak ciągła ochrona boczna, a tym samym przewyższają normę IEC 60601-2-52. Przy mocowaniu za pomocą pasów brzusznych nie jest konieczne posiadanie na magazynie dodatkowych akcesoriów.



W przypadku wyższych materacy można dodatkowo zwiększyć zabezpieczenie o plus 6cm.




Większe bezpieczeństwo – mała środkowa szczelina 3 < 60 mm

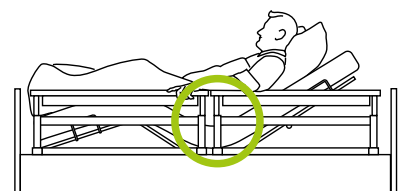

- Ukierunkowana zgodność z normą IEC 60601-2-52
- Bezpieczeństwo w pozycji roboczej, czyli także z podniesionym oparciem lub podnóżkiem
- Bezpieczeństwo bez stosowania dodatkowego centralnego zabezpieczenia szczeliny jako akcesorium do unieruchamiania pasem brzuszny zgodnie z BfArM*2 (Niemiecki Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych)


Łatwość opieki

4 podziały bezpieczeństwa = elastyczny dostęp

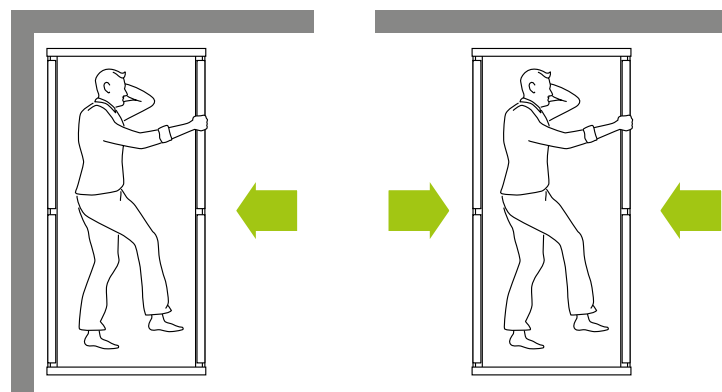

- Elastyczne wykorzystanie łóżka do standardowej opieki, nawet w ograniczonej przestrzeni
- Elastyczny dostęp z obu stron łóżka w przypadku zwiększonej potrzeby opieki
- Elastyczne wykorzystanie łóżka do wyjścia z łóżka po lewej lub prawej stronie, aby zmobilizować mieszkańca
- Unikanie dodatkowych kosztów ulepszania podzielonych osłon bocznych

Mobilność i bezpieczeństwo niezależnie od wielkości ciała

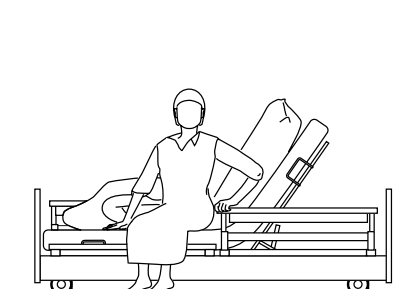

Dzielona osłona boczna może być używana bardzo efektywnie, ponieważ jest łatwa do uchwycenia i objęcia. Służy zatem jako bezpieczna pomoc przy wstawaniu i wyraźnie wspiera mobilność osoby starszej.

2 pozycje automatyczne



Oglądaj telewizję, czytaj lub zjedz śniadanie w łóżku dzięki automatycznemu komfortowemu fotelowi



Zapobieganie odleżynom poprzez automatyczne pozycjonowanie

* Środki pozabawiające wolność
*2 Informacja udzielona przez BfArM (Niemiecki Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych) dla specjalistów, z dnia 8 lipca 2004 (numer referencyjny 913/0704)




Bezpieczna opieka, mobilizacja i sen

system 3-STOP

- Wygodny zakres regulacji 27-80 cm
- Pierwszy stoper do wstawiania z łóżka na wysokości krzesła 41 cm
- Ochrona przed kolizją podczas regulacji wygodnej pozycji siedzącej z pozycji niskiej oraz podczas korzystania z przedłużenia

80 cm

Optymalna pozycja opiekuńcza

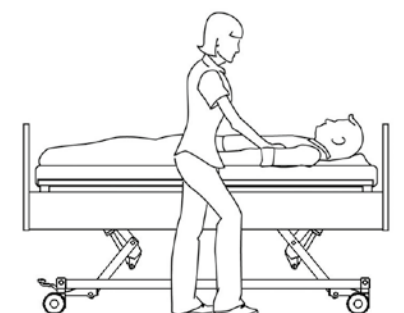


41 cm*

Bezpieczna mobilność



27 cm*

Zapobieganie upadkom podczas fazy snu

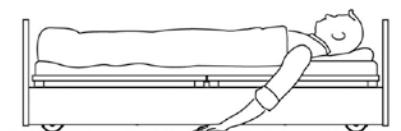


Elastyczność i oszczędność czasu

Beznarzędziowa regulacja długości łóżka

- Nasze łóżka pielęgnacyjne są standardowo wyposażone w zintegrowany system przedłużenia łóżka
- Specyfikacje normy IEC 60601-2-52 są spełnione w każdej konfiguracji


200 cm

Długość łóżka 200cm: podzielone osłony boczne zapewniają ochronę bez dużej środkowej szczeliny* i bez ochraniacza.

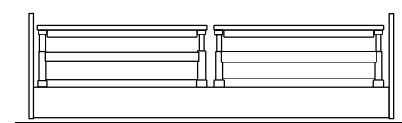


210 cm

Alternatywna długość łóżka 210cm: Ochrona z dłuższymi osłonami bocznymi po stronie podnóżka bez akcesoriów i bez szczeliny >318mm**.

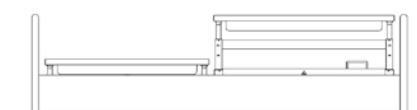

220 cm

Przedłużenie łóżka do 220 cm: można regulować na łóżkach sentida z podzielonymi osłonami bocznymi – pełną ochronę zapewni dodatkowy podnóżek (wyposażenie dodatkowe).

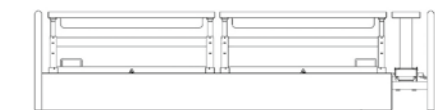




Aranżacja Kwiat Dalii

sentida 7-i | Design G10

Natura jako wzór doboru materiałów i kolorów. Harmonijnie skoordynowane jak kwiat dalii – tak powstał komfortowo urządzony pokój, który daje mieszkańcowi poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Siedząc przy oknie spogląda się w zieloną oazę i wsłuchuje się w naturę. Ta aranżacja jest tylko sugestią, chętnie doradzimy indywidualnie.

Dąb Lindber

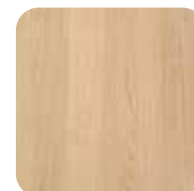

Kolor ścian



Kolory Deko



2 modele do wyboru

Model domowy



Zdolność jazdy
Każdą wysokość łóżka

Rolki
Cztery podwójne kółka zakryte w całości



Zdolność hamowania
Hamulec nożny z centralnym blokowaniem 2 rolek

Regulacja wysokości
27-80 cm

CareBoard®

2 pozycje do wyboru



Uchwyt ścienny, połączenie kablowe od strony głowy

Model mobilny



Zdolność jazdy
Każdą wysokość łóżka

Kółka
100, 125 lub 150 mm kółka lub kółka podwójne 125 mm lub kółka designerskie



Zdolność hamowania
Drażek hamulca po stronie podnóżka z 4-rolkowym centralnym zamkiem

Regulacja wysokości
27-80 cm z 100 mm kółkami płynnie pracującymi
29.5-82.5 cm z 125 mm kółkami płynnie pracującymi
28-81 cm z 125 mm podwójnymi kółkami lub z kółkami designerskimi
32-85 cm z 150 mm kółkami płynnie pracującymi



Wspornik sekcji stopy, połączenie kablowe po stronie stopy

2 lampy

soluna i lymera

Specjalnymi elementami stylistycznymi opraw są klosze w kształcie fali lub przezroczyste o częściowo prześwitującym charakterze. Nasze oprawy wyposażone w odchylane ramię umożliwiają dokładne ustawienie punktu świetlnego w pobliżu oświetlanego obiektu.



Komfortowa lampka do czytania LED lymera

Zalety LED

- Długa żywotność
- Niskie zużycie energii
- Brak wytwarzania ciepła
- Całkowicie bezpieczna obsługa



Designerska lampa LED soluna z ryflowanym kloszem



Design | zagłówek/zanózek

zagłówek



Design A
zagłówek/zanózek



Design D



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design T



Design Ts

zanózek



Design Ak
zagłówek/zanózek



Design D



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design T



Design Ts

sekcja niska



Design Ak
złożony



Design Dx



Design Dfx



Design Gx



Design Kx



Design OX



Design Tx



Design Tsx

Kolory | dekory*



Biały wulkaniczny (U11502)



Brzoza Lund (R35018)



Dąb Lindber (R20021)



Sosna Suomi Szara (R55022)



Buk naturalny (R24015)



Buk (R24034)



Wiśnia (R42002)



Wiśnia Havana (R42006)



Sosna wiejska (R55023)



Akacja ciemna (R38006)



Kombinacje kolorów dla
aranżacja pokoju memoriana

Certyfikat bezpieczeństwa

wissner-bosserhoff dobrowolnie kontroluje procesy produkcyjne i zarządzanie przez TÜV Süd.
Firma jest certyfikowana zgodnie z przepisami ISO 9001 dla systemów zarządzania jakością,
DIN EN ISO 13485 dla produkcji wyrobów medycznych i ISO 14001 dla zarządzania środowiskiem.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



Certyfikat CB
potwierdzający
bezpieczeństwo
produktów TÜV Süd



Opinia eksperta na
osłon bocznych



CE



ISO 9001
Certified
Quality Management System
www.tuv-sud.com/ms-cert



ISO 14001
Certified Environmental
Management System
www.tuv-sud.com/ms-cert

Skaj



Wyjątkowy dotyk, szczególne właściwości i wyraziste tłoczenia nadają wysokiej jakości materiałom obiciowym indywidualny charakter. Oprócz nietypowych wzorów powierzchnie wyróżnia również łatwość pielęgnacji. Sztuczna skóra wykonana z tworzywa sztucznego PVC odznacza się przede wszystkim trwałością, a tym samym zapewnia doskonałą jakość.



Srebrnoszary (F6461730)



Perła (F6461662)



Brzozowy (F6461661)



Kamyk (F6461653)



Kaszmir (F6461737)



Smoke (F6461660)



Wiśnia (F6461665)



Kukurydza (F6461706)



Limonka (F6461657)



Royal (F6461710)

Właściwości wszystkich materiałów pokazano tutaj:

- Odporny na wilgoć i brud
- Oddychający
- Wodoodporne
- Odporne na krew i mocz
- Odporny na środki dezynfekujące
- Wyjątkowo wytrzymałe
- Przyjazny dla środowiska i nietoksyczny
- Trwałe
- Ognioodporny
(zgodnie z kryteriami zapalności wg z DIN EN 1021 część 1 + 2 i BS 5852 Crib 5*)

Tkaniny



Te tkaniny obciowe są niezrównane pod względem czystego i schludnego wyglądu. Opatentowany innowacyjny system nie pozostawia szans na bakterie, brud i wilgoć. Piękne wzory na pierwszorzędnym materiałach oferują szerokie możliwości łączenia materiałów obiciowych i dekoracyjnych. Stosowane są tutaj markowe włóczki z poliestru FR lub Trevira CS.



Zielony, kwiat (Aurora 6520)



Niebieski, paski (Agon 5520)




Szary, paski (Agon 8520)



Szary, kropki (Flint 8520)



Łąka (Mailo 6520)

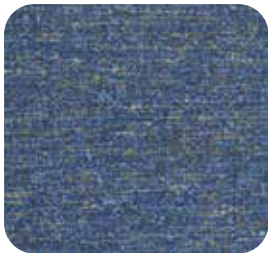

Morze (Mailo 5520)



Piasek (Mailo 1521)



Kamień (Mailo 8520)



Róża (Mailo 4520)

50-0818

Miękka okładka na wezglowie Df do łóżek medycznych Sentida

50-0819

Miękka okładka części podnóżka Df do łóżek ze standardowym przedłużeniem **

50-0820

Miękka okładka części podnóżka Df do łóżek z ekspresowym przedłużeniem **




Sprzęt i akcesoria

Opcje wyposażenia

Wersja podstawowa
Waga (w tym kontrola BMI), wyjście z łóżka, przygotowanie dokumentacji pielęgnacyjnej

- Moduł 1** Dokumentacja pielęgnacyjna
- Moduł 2** Free & Safe
- Moduł 3** Asystent wilgoci
- Moduł 4** Zestaw mobilizacyjny


Wymiary

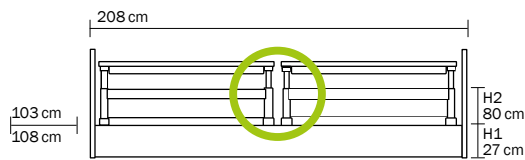

sentida 7-i z podzielnymi osłonami (zestaw 10er), pełne wymiary zewnętrzne: L = 208 cm, B = 103/108 cm
wymiary materaca: L = 200 cm, B = 87 cm
H1 27 cm (niska pozycja), H2 80 cm (wysoka pozycja)

10-0697
sentida 7-i
Inteligentny i domowy
10-0698
sentida 7-i
Inteligentny i mobilny


Powierzchnie leża

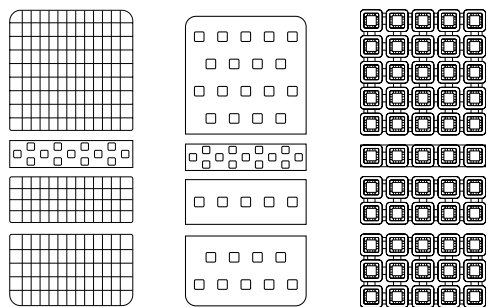

Standard | Aero EasyClean Comfort


Modułowość powierzchni leży

Do wyboru są 3 różne opcje powierzchni leża:
01 Siatkowa powierzchnia leża Aero zapewnia dobrą wentylację.
02 Syntetyczne maty powierzchni leża Easyclean są szczególnie łatwe do czyszczenia.
03 Komfortowa powierzchnia leża z 55 elementami sprężystymi nie tylko sprzyja komfortowi łóżka, ale także wnosi cenny wkład w zapobieganie odleżynom.
Ogólnie rzecz biorąc, przegrody na powierzchni leża można łatwo zdjąć i wyczyścić.

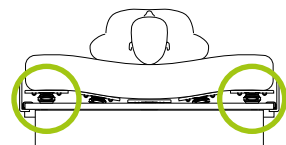


Komfortowa powierzchnia leża z 55 elementami sprężynowymi


Przedłużenie łóżek

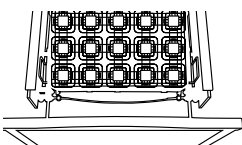

Przedłużenie łóżka z ekspresowym rozwiązaniem (Opcja)

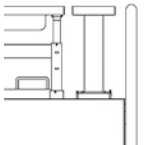


Stałe przedłużenie łóżka 10 szyn bocznych (opcja)

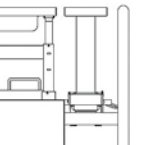

10-0580
Ochroniacz na przedłużenie łóżka o 20 cm (opcja)


Opcje

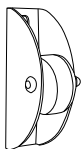


Pionowe rolki ochronne do ścian




Rolki ochronne do ścian 3D z efektem poziomym i pionowym

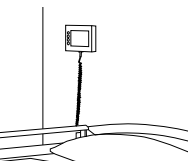

Złącze kablowe po stronie głowy ze wspornikiem do montażu na ścianie

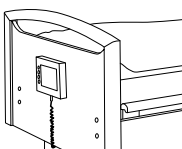


Połączenie kablowe po stronie podnóżka ze wspornikiem

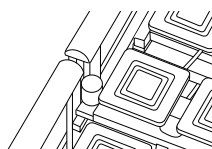


Połączenie boczne do maty czujnika wilgoci


Wyposażenie

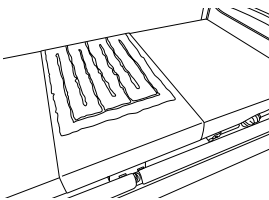


50-0583
Mata do czujników wilgotności wykonana z bawełny; bez kabla

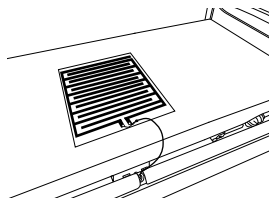

50-0624
Mata do czujników wilgotności wykonana z tworzywa sztucznego; w komplecie z kablem

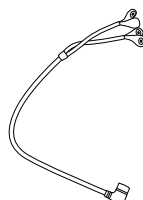


50-0623
Kable do maty bawełnianej

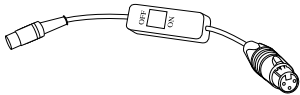


04-1508
Kabel adaptera z włącznikiem / wyłącznikiem i odpowiednia wtyczka do podłączenia do system wezwania pielęgniarzy (dostosowany do klienta) dla wersji przewodowej i bezprzewodowej




04-1608
Kabel adaptera bez włącznika / wyłącznika; z odpowiednią wtyczką do podłączenia do systemu przywołania pielęgniarzy (zależnie od klienta) dla wersji przewodowej i bezprzewodowej

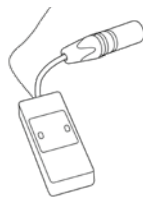


50-0681
Bezprzewodowy odbiornik dla wersji bezprzewodowej

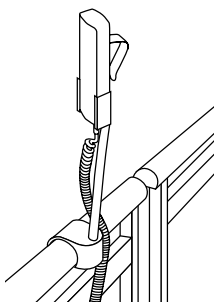

10-0419 and 10-0790
Dostępność dla mieszkańców i personelu przez cały czas

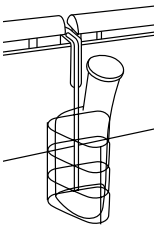


50-0165 Uchwyt na pojemnik z moczem
50-0164 Uchwyt na worek na mocz (nie pokazano)
10-0424 Uchwyt na akcesoria

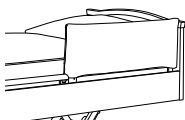


50-0174
Mata amortyzacyjna na osłony boczne dzielone (10)




50-0771
Mata zderzeniowa z zabezpieczeniem antypoślizgowym B 90 x L 200 cm, wysokość ok. 4,5 cm

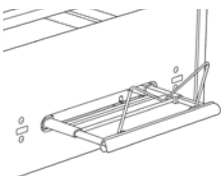


10-0617
Zintegrowana designerska półka na pościel Kompatybilna ze wszystkimi łóżkami (oprócz Design A-kk i CareBoard® po stronie nóg)

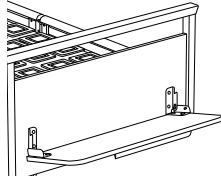

10-0719
Uchwyt na bieliznę

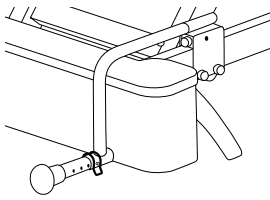

Dystans naścienny u góry, teleskopowy, tylko dla Sentida 5 i 6
10-0801 krótki, 1 x 20 mm
10-0802 średni, 4 x 20 mm
10-0803 długi, 8 x 20 mm
dystansowy do ściany, tylko dla Sentida 5 i 6 (nie pokazano)
10-0707 krótki | **10-0709** długi

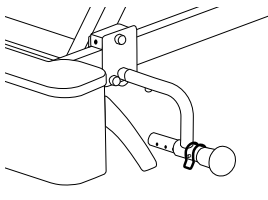

Boczna przekładka ścienna, teleskopowa, tylko dla Sentida 5 i 6
10-0804 krótki, 1 x 20 mm
10-0805 średni, 4 x 20 mm
10-0806 długi, 8 x 20 mm
Boczny dystans do ściany, tylko dla Sentida 5 i 6 (nie pokazano)
10-0708 krótki | **10-0710** długi

Members of LINET Group



wissner-bosserhoff | Germany | wi-bo.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce
Destini Group Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Obornicka 52 | 62-002 Złotniki | Polska
Tel.: +48 790 665 445
biuro@destinicare.pl | destinicare.pl
NIP 9721258845

**DESTINI
CARE** 