

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff



variana

Demontowalne i zmywalne łóżko medyczne





variana


Demontowalne i zmywalne łóżko medyczne

Na światowy rynek usług opiekuńczych oddziałują najróżniejsze wyzwania i czynniki, w szczególności rosnąca liczba osób wymagających opieki w domach seniorów i w ramach opieki krótkoterminowej. To stawia nie tylko osoby prowadzące placówki opiekuńcze i opiekunów w domach seniorów przed coraz większymi wyzwaniami jakościowymi i ekonomicznymi, lecz również krewnych osób wymagających opieki, którzy chcieliby zapewnić swoim najbliższym jak najlepsze otoczenie i opiekę. Zainteresowaniem cieszą się koncepcje i produkty ułatwiające opiekę dzięki wysokiej elastyczności, przekonujące pod względem ekonomicznym i charakteryzujące się wysokim standardem komfortu i wzornictwa, aby spełnić wysokie oczekiwania osób wymagających opieki i ich krewnych.

Łóżko medyczne variana to idealne połączenie funkcjonalności i elastyczności z ekonomicznością i wzornictwem.

Przewidywalny rozwój potrzeb w zakresie długotrwałej opieki na świecie*

Osoby w mln

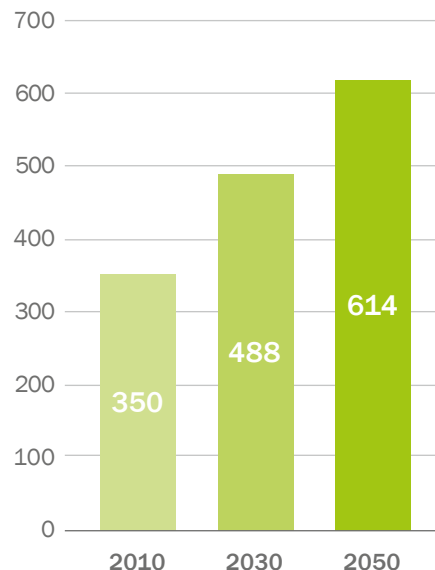

* Statista GmbH 2021
(<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/274028/umfrage/anzahl-pflegebeduerftiger-menschen-nach-weltregion/>)

Ponad
90 %
materiałów naszych
łóżek medycznych
nadaje się do
recyklingu



Ponad
40 %
materiałów naszych
łóżek medycznych
pochodzi już
z recyklingu

W dzisiejszych czasach łóżko medyczne ocenia się nie tylko pod kątem ekonomiczności, wzornictwa czy funkcjonalności. W niemal wszystkich sferach społecznych coraz ważniejszą rolę odgrywają również zrównoważone produkty. wissner-bosserhoff postawił sobie za cel nie tylko spełnienie tych oczekiwań, lecz wręcz wyznaczenie nowych standardów. Jako że nasze łóżka medyczne wykonane są w przeważającej części z surowców wtórnych, przyczyniamy się w znaczący sposób do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

variana

Demontowalne i zmywalne łóżko medyczne






Intuicyjna obsługa

Zmywalny pilot łóżek medycznych variana wyróżnia się intuicyjną obsługą i przejrzystym układem przycisków. Przyciski po naciśnięciu są podświetlane, co umożliwia prostą obsługę również w nocy.



Dodatkowe funkcje

Zablokowanie poszczególnych funkcji możliwe jest w szybki i prosty sposób przy użyciu kombinacji przycisków.

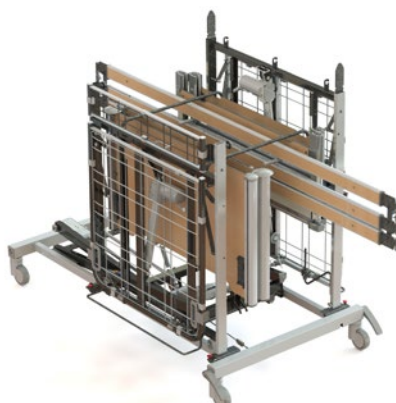

Demontaż

Łóżko można rozłożyć w kilku krokach bez korzystania z narzędzi, a następnie bez problemu je przetransportować. Rozłożone części można po prostu przymocować do ramy dolnej i w ten sposób bez trudu przewieźć.

SafeFree® Flex

Indywidualne zabezpieczenia boczne dostosowane do potrzeb

Oprócz jednoczęściowych zabezpieczeń bocznych model variana oferuje również dzielone zabezpieczenia boczne SafeFree® Flex, co stanowi przytulną alternatywę, zapewniając jak największą swobodę przy jak największej ochronie, a poza tym zapewnia maksymalne wsparcie przy mobilizacji rezydenta. Ponadto zabezpieczenia boczne modelu variana można skonfigurować w prosty sposób w zależności od potrzeb. Wszystkie zabezpieczenia boczne są szybko demontowalne bez narzędzi i mogą w dowolnej chwili zostać doposażone w nowe elementy.

Safe

Pełna ochrona



- Bezpieczne zamocowanie elementów
- Uniemożliwia przypadkowe poluzowanie lub usunięcie elementów bocznych
- Demontaż bez narzędzi

Elastyczna mobilizacja



- Optymalna długość i indywidualna regulacja wysokości
- Ochrona bioder podczas snu oraz wygodna i ergonomiczna mobilizacja rezydenta

Zrównoważony rozwój

Materiał naszych zabezpieczeń bocznych nadaje się w ponad 90% do recyklingu.



Free – mniej ŚOW*

Elementy dzielone po obu stronach



- Celowe „pominięcie” zabezpieczeń bocznych
- Bezpieczna inwestycja dla osoby prowadzącej placówkę opiekuńczą, zabezpieczenie prawne w zakresie ŚOW dla personelu opiekuńczego lub krewnych

Elementy dzielone z jednej strony



- Dzielone zabezpieczenia boczne SafeFree® Flex z jednej strony i aluminiowe jednoczęściowe zabezpieczenia boczne z drugiej strony
- W pełni zmywalne elementy boczne

Zabezpieczenia jednoczęściowe



- Z obu stron aluminiowe zabezpieczenia jednoczęściowe
- W pełni zmywalne elementy boczne

Wyższa ekonomiczność

Elastyczność w zależności od potrzeb

Elastyczny montaż elementów bocznych umożliwia elastyczne korzystanie z budżetu. Alternatywę dla naszych w pełni zmywalnych elementów bocznych i zmywalnych zagłówków i zanóżków stanowią przytulne drewniane ramy łóżek.



Bezpieczeństwo w dzień i w nocy

SafeSense® – inteligentny system czujników do wykrywania pustego łóżka

Jesteśmy niezawodnym partnerem w zakresie unikania ŚOW: wissner-bosserhoff prezentuje SafeSense® – system wspomagający z inteligentnym układem czujników, które skutecznie wspierają ograniczanie ŚOW w dzień i w nocy.

System wyposażony jest w automatyczne oświetlenie nocne, które włącza się, gdy rezydent wstanie z łóżka, i gaśnie, gdy rezydent do niego wraca. SafeSense® jest kompatybilny z dostępnymi na rynku systemami przywoływania pielęgniarek oraz może być używany do wszystkich naszych łóżek od 2002 roku.



Automatyczne oświetlenie nocne

- Oświetlenie nocne włącza się automatycznie, gdy rezydent wstanie z łóżka
- Oświetlenie nocne gaśnie, gdy rezydent wróci do łóżka



Indywidualny alarm

- Bezstopniowa elastyczna konfiguracja od natychmiastowego alarmu po 0 s do 30 min
- Dostosowany do mobilności rezydenta

IPX4

Wyższe bezpieczeństwo – mniej ŚOW*

- Krótszy czas reakcji w razie upadku
- Wyższy poziom bezpieczeństwa na dyżurach nocnych i weekendowych
- Mniej wizyt kontrolnych u rezydentów
- Idealne w połączeniu z zabezpieczeniem bocznym SafeFree®

Zintegrowany + w zestawie do modernizacji łóżka

- Opcjonalne wyposażenie naszych aktualnych łóżek medycznych variana
- Zestaw do modernizacji do naszych łóżek elektrycznych od 2002 r.
- Dostępny w wersji bezprzewodowej lub z przewodem



Elastyczność w myciu

Proste czyszczenie całego łóżka

Łóżko medyczne variana jest seryjnie wyposażone w pakiet washability „Standard”, umożliwiający elastyczne i szybkie czyszczenie łóżka w regularnych cyklach mycia.

Jeżeli w praktyce konieczne jest jednak częstsze czyszczenie, istnieje możliwość wybrania pakietu washability „Premium” i skonfigurowania modelu variana zgodnie z potrzebami każdej placówki. I tak dzięki regularnemu czyszczeniu łóżka typowe powierzchnie kontaktowe mogą zostać poddane dezynfekcji, przyczyniając się do profilaktyki zakażeń.



Model variana umożliwia elastyczne czyszczenie, optymalnie dostosowane do potrzeb placówki.



Niewidzialna ochrona: W pakiecie washability „Premium” łóżko powlekane jest dodatkową powłoką KTL*, zapewniającą niezawodną ochronę łóżka również w przypadku częstych cykli mycia.



Całkowicie zmywalne: Nowe zagłówki i zanózki modelu variana oraz jednocześnie i dzielone zabezpieczenia boczne jako typowe powierzchnie kontaktowe również są w pełni zmywalne.

Wkład w zapobieganie odleżynom

Modułowość powierzchni do leżenia i podwójne cofnięcie leża

Od lat powierzchnie do leżenia wissner-bosserhoff charakteryzują się tak zwanym podwójnym cofnięciem leża. Przy tym od siedziska przesuwane jest nie tylko oparcie, lecz również podparcie nóg, zwiększając powierzchnię siedziska. Wyniki pomiarów nacisku wyraźnie pokazują, że obciążenie naciskowe na podwójnie cofniętym leżu jest znacznie niższe niż w przypadku standardowej powierzchni do leżenia.

ok. 37,5 %

wszystkich rezydentów niemieckich domów seniorów i placówek opiekuńczych ma podwyższone ryzyko powstawania odleżyn

Źródło: dane własne, wissner-bosserhoff 2020


ok. 2,7 mln

osób w Niemczech cierpi z powodu przewlekłych ran, jak odleżyny

Źródło: badanie BVMed 2012


Nasze rozwiązania

Powierzchnia do leżenia WIBO ze znacznym odciążeniem

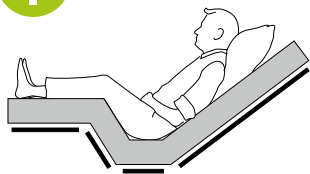


6 cm ← → 11 cm

Podwójne cofnięcie leża = zapobieganie odleżynom

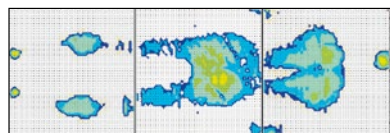


Termografia powierzchni do leżenia BiNetic

Standardowa powierzchnia do leżenia bez odciążenia

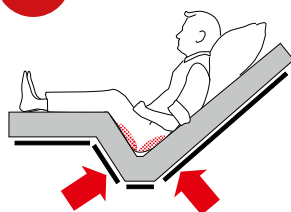

Pojedyncze cofnięcie leża = ryzyko odleżyn

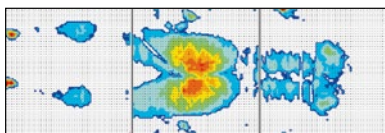

Termografia standardowej powierzchni do leżenia

Modułowość powierzchni do leżenia


Do wyboru są 3 różne powierzchnie do leżenia:



Metalowa siateczka Aero (standard)
→ dobra wentylacja



Podkładki z tworzywa sztucznego
EasyClean
→ łatwe czyszczenie

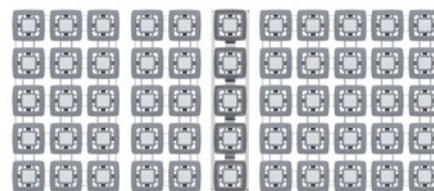

Wygodna powierzchnia do leżenia,
55 sprężyn
→ wysoki komfort leżenia i proste odciążenie



Podwójne cofnięcie
leża =

17 cm

więcej miejsca w łóżku!

Wzornictwo | zagłówek/ zanózek

Zagłówek



Wzór G



Wzór Ts



Wzór V

Zanózek



Wzór G




Wzór Ts



Wzór V

Kolory | dekory

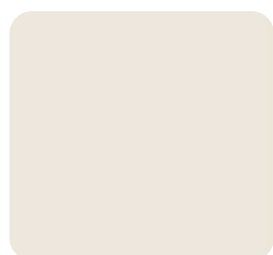

Białoszary (U11050)



Dąb Lindberg (R20021)



Buk młyński (R24006)




Buk zgaszony (R24034)

Wypożyczenie i akcesoria


Dane techniczne

Bezpieczne obciążenie robocze	235 kg • 200 kg waga rezydenta • 35 kg materac + akcesoria
Długość x szerokość	218 x 111 cm
Regulacja wysokości	H1 = 34 – 82 cm H2 = 25 – 73 cm (opcjonalnie z inną ramą spodnią)
Nominalny wymiar powierzchni do leżenia	87 / 90 x 210 cm Opcja: 105 x 210 cm Opcja: 120 x 210 cm
Wymiary powierzchni do leżenia	200 x 90 x 14 cm Opcja 210 x 105 x 14 cm Opcja 210 x 120 x 14 cm
Układ hamulcowy	Centralny hamulec postojowy z blokadą kierunku
Opcja	Wysuwanie zagłówka i zanózka o 10 cm

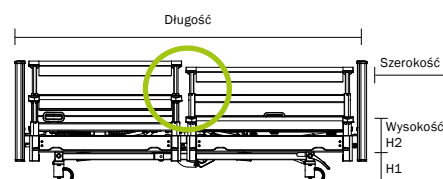


10-0910
variana


Przedłużenia łóżka

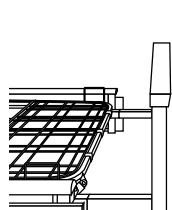

Tymczasowe przedłużenie łóżka zabezpieczeniem bocznym 10 (standard)

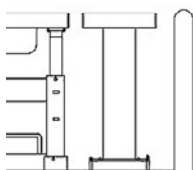

Zabezpieczenie przedłużenia łóżka od strony zagłówka i zanózka o 10 cm

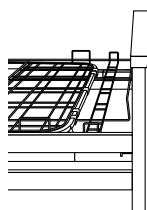


Zintegrowane przedłużenie łóżka 09, aluminiowe zabezpieczenie boczne teleskopowe




Rolki ochronne do ścian 3D z efektem poziomym i pionowym

Akcesoria

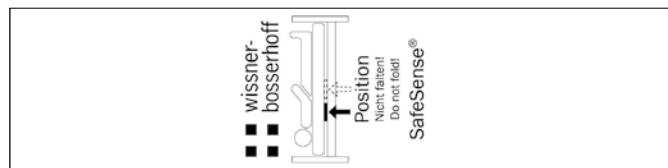


02-000876
Mata z czujnikami 2.1 SafeSense®, 80 x 20 cm

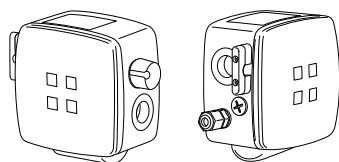


10-0812
Cyfrowa skrzynka do wykrywania pustego łóżka 2.1 SafeSense® z przewodem lub bezprzewodowa

SafeSense® w zestawie:


Mata z czujnikami 2.1 & Skrzynka do wykrywania pustego łóżka 2.1
10-0871
Wersja z przewodem
10-0872
Wersja bezprzewodowa

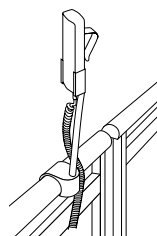

10-0913
Przełącznik ręczny do dzielonych zabezpieczeń bocznych

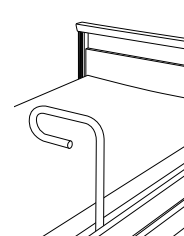

10-0715
Uchwyt do wstawiania z łóżka do 09 i uchwyt do wstawiania do zabezpieczeń bocznych 09

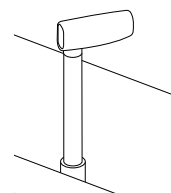

10-0634
Uchwyt do mobilizacji MobiStick 2



wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstr. 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr) | Niemcy

Tel. +49 2377 784-0 | Fax -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.de



Bigla Care AG

Bahnhofstrasse 4 | CH-3507 Biglen | Switzerland

Tel.: +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch

Members of LINET Group

